

床ずれ防止用具とポジショニング用具の耐薬品性・耐洗浄性等について

表1 防水カバーや防水フィルムで覆われている製品の耐薬品性

下表は表面全体を清拭できる製品の耐薬品性を一覧にまとめたものです。

新型コロナウイルス等への有効性を保証するものではありません。

製品の製造時期や使用状況、使用環境、メンテナンス状態等により可否が異なる可能性もあるため、詳細については別表にある各社問合せ先へご連絡ください。

	企業名	商品名	0.05%次亜塩素酸 ナトリウム	70%エタノール	その他 備考欄
1	タカノ株式会社	タカノクッションR カバー	×	○	
2	タカノ株式会社	タカノクッションR 本体	×	×	
3	タカノ株式会社	タカノクッションwipeR カバー	○	○	
4	タカノ株式会社	タカノクッションwipeR 本体	×	×	
5	タカノ株式会社	ジェルセルクッション(ジェルセル・ジェルセルG2) カバー	○	○	
6	タカノ株式会社	ジェルセルクッション(ジェルセル・ジェルセルG2) 本体	×	○	
7	タカノ株式会社	シーティングサポートパッド カバー	×	○	
8	タカノ株式会社	シーティングサポートパッド 本体	×	×	
9	タカノ株式会社	子ども用 車椅子クッション Y-M3シリーズ カバー	×	○	
10	タカノ株式会社	子ども用 車椅子クッション Y-M3シリーズ 本体	×	×	
11	タカノ株式会社	子ども用 車椅子クッション Y-H2シリーズ カバー	×	○	
12	タカノ株式会社	子ども用 車椅子クッション Y-H2シリーズ 本体	×	×	
13	タカノ株式会社	子ども用 車椅子クッション Yシリーズ カバー	×	○	
14	タカノ株式会社	子ども用 車椅子クッション Yシリーズ 本体	×	×	
15	アクションジャパン株式会社	アクションパッド手術室用各種 本体	○	○	熱水・石鹼洗浄可能
16	アクションジャパン株式会社	アクションパッド車いす用#9000 本体	○	○	熱水・石鹼洗浄可能
17	アクションジャパン株式会社	アクションパッド車いす用#5200 本体	○	○	
18	アクションジャパン株式会社	高反発マットレス すやり 防水カバータイプ	○	○	長時間のつけ置きは色落ち、シワの原因となります。
19	株式会社伸和	サーモコンアマットレスAg+	○	○	丸洗い・浸け置きは不可。ただし、カバーのみの浸け置き・95℃までの温水洗浄は可。(カバーは完全に乾燥させたあと装着してください)
20	株式会社伸和	サーモコンアリバーシブルマットレスAg+	○	○	丸洗い・浸け置きは不可。ただし、カバーのみの浸け置き・95℃までの温水洗浄は可。(カバーは完全に乾燥させたあと装着してください)
21	株式会社伸和	サーモコンオーバーレイマットレスAg+	○	○	丸洗い・浸け置きは不可。ただし、カバーのみの浸け置き・95℃までの温水洗浄は可。(カバーは完全に乾燥させたあと装着してください)
22	株式会社伸和	サーモコンアクションAg+	○	○	丸洗い・浸け置きは不可。ただし、カバーのみの浸け置き・95℃までの温水洗浄は可。(カバーは完全に乾燥させたあと装着してください)
23	株式会社伸和	ボディサポートクッションAg+	○	○	丸洗い・浸け置きは不可。ただし、カバーのみの浸け置き・95℃までの温水洗浄は可。(カバーは完全に乾燥させたあと装着してください)
24	アイ・ソネックス株式会社	ライトターン	×	○	浸け置きは不可、清拭のみ。

	企業名	商品名	0.05%次亜塩素酸 ナトリウム	70%エタノール	その他 備考欄
25	アイ・ソネックス株式会社	USAKOクビマクラ	○	○	浸け置きは不可、清拭のみ。
26	アイ・ソネックス株式会社	USAKOユークッション	○	○	浸け置きは不可、清拭のみ。
27	パラマウントベッド株式会社	こちあ利楽	○	○	
28	パラマウントベッド株式会社	こちあ結起 3Dタイプ	○	○	
29	パラマウントベッド株式会社	こちあ結起 Slimタイプ	○	○	
30	パラマウントベッド株式会社	こちあ風香	○	○	
31	パラマウントベッド株式会社	エバープラウドドライタイプ	○	○	
32	パラマウントベッド株式会社	エバープラウド 清拭タイプ	○	○	
33	パラマウントベッド株式会社	エバーリーフシャイン	○	○	
34	パラマウントベッド株式会社	エバープレディス	○	○	
35	パラマウントベッド株式会社	ストレッチグライド 清拭タイプ	○	○	
36	パラマウントベッド株式会社	アクアフロート 清拭タイプ	○	○	
37	パラマウントベッド株式会社	エバーフィットC3 ドライタイプ	○	○	
38	パラマウントベッド株式会社	エバーフィットC3 清拭タイプ	○	○	
39	パラマウントベッド株式会社	エバーフィット 清拭タイプ	○	○	
40	パラマウントベッド株式会社	エバーリーフ	○	○	
41	パラマウントベッド株式会社	ストレッチフィット 清拭タイプ	○	○	
42	パラマウントベッド株式会社	マキシーフロート	×	○	
43	パラマウントベッド株式会社	コンフォケア	×	○	
44	パラマウントベッド株式会社	アキュマックス	×	○	
45	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Lサイズ 清拭タイプ	○	○	2019年7月以降 カバー:黄緑色
46	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Mサイズ 清拭タイプ	○	○	2019年7月以降 カバー:黄緑色
47	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Sサイズ 清拭タイプ	○	○	2019年7月以降 カバー:黄緑色
48	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Lサイズ	○	○	2019年6月以前 カバー:黄色
49	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Mサイズ	○	○	2019年6月以前 カバー:黄色
50	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Sサイズ	○	○	2019年6月以前 カバー:黄色
51	株式会社加地	エクスジェル アウルREHAシリーズ清拭カバー仕様(6種)	○	○	カバー:40度洗濯乾燥可能
52	株式会社加地	ポーズインフォーム(ポジショニング14種)	○	○	カバー:95度洗濯60度乾燥可能/本体40度洗浄80度乾燥
53	株式会社加地	エクスジェル ベッド用減圧マット(大・小)	○	○	
54	株式会社モルテン	レイオス	○	○	浸け置きは不可
55	株式会社モルテン	オスカー	○	○	浸け置きは不可
56	株式会社モルテン	オスカー(エアタイプ)	○	○	浸け置きは不可

	企業名	商品名	0.05%次亜塩素酸 ナトリウム	70%エタノール	その他 備考欄
57	株式会社モルテン	アメリア	○	○	浸け置きは不可
58	株式会社モルテン	アマンダ	○	○	浸け置きは不可
59	株式会社モルテン	ステージア	○	○	浸け置きは不可
60	株式会社モルテン	ステージア(エアタイプ)	○	○	浸け置きは不可
61	株式会社モルテン	プライム レボ	○	○	浸け置きは不可
62	株式会社モルテン	グランデ	○	○	浸け置きは不可
63	株式会社モルテン	グランデスリム	○	○	浸け置きは不可
64	株式会社モルテン	アドバン	○	○	浸け置きは不可
65	株式会社モルテン	クレイド	○	○	浸け置きは不可
66	株式会社モルテン	フィール	○	○	浸け置きは不可
67	株式会社モルテン	ナッキー	○	○	浸け置きは不可
68	株式会社モルテン	ナッソー	○	○	浸け置きは不可
69	シーホネンス株式会社	C-MAXマットレス	○	○	
70	シーホネンス株式会社	Fit-texマットレス	○	○	

床ずれ防止用具とポジショニング用具の耐薬品性・耐洗浄性等について

表2 通気性カバーや通気性生地で覆われている製品の耐洗浄性・耐薬品性

下表は製品本体を洗浄することができる製品の洗浄性や耐薬品性を一覧にまとめたものです。

新型コロナウイルス等への有効性を保証するものではありません。

製品の製造時期や使用状況、使用環境、メンテナンス状態等により可否が異なる可能性もあるため、詳細については別表にある各社問合せ先へご連絡ください。

	企業名	商品名	石鹼や洗剤による丸洗い洗浄	熱水洗浄 80度10分間	0.05%次亜塩素酸 ナトリウム 30分間浸漬	その他 備考欄
1	タカノ株式会社	にこにこFit カバー	○	○	×	
2	タカノ株式会社	にこにこFit 本体	○	○	○	
3	タカノ株式会社	Co・Co・Chiベース	○	○	○	
4	タカノ株式会社	にこにこクッション カバー	○	○	×	
5	タカノ株式会社	にこにこクッション 本体	○	×	×	
6	タカノ株式会社	学童いす用クッション LAPS kids カバー	○	○	×	
7	タカノ株式会社	学童いす用クッション LAPS kids 本体	×	×	×	
8	タカノ株式会社	座位保持クッションLAPS カバー	○	○	×	
9	タカノ株式会社	座位保持クッションLAPS 本体	×	×	×	
10	アクションジャパン株式会社	アクションパッド ベッド用 カバー	○	○	×	
11	アクションジャパン株式会社	アクションパッド 車いす用 カバー	○	○	×	
12	アクションジャパン株式会社	高反発マットレス すやり 本体	○	×	×	洗浄60℃まで 15分間
13	アクションジャパン株式会社	高反発マットレス すやり 通気カバー	○	○	×	
14	アクションジャパン株式会社	4Dハートフルクッション カバー	○	○	×	表面撥水 裏面防水の生地
15	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントパットA 通気カバー	○	○	×	脱水後、日陰乾燥。
16	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントパットA 防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75℃まで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
17	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントパットA 本体	○	○	×	洗浄の際は、手洗い・押し洗い。
18	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントEx専用防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75℃まで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
19	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントEx専用Ab防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75℃まで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
20	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントEx 本体	○	○	○	脱水後、日陰乾燥。
21	アイ・ソネックス株式会社	メディカルパット 防水カバー	○	○	○	脱水後、裏返して日陰乾燥。
22	アイ・ソネックス株式会社	メディカルパット 本体	○	○	×	洗浄の際は、手洗い・押し洗い。
23	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントスワロー 防水カバー	○	○	○	脱水後、裏返して日陰乾燥。
24	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントスワロー 本体	○	○	×	洗浄の際は、手洗い・押し洗い。
25	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントロール カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75℃まで。脱水後、日陰乾燥。
26	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントロール 本体	○	×	○	洗浄、乾燥とも75℃まで。脱水後、日陰乾燥。
27	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントアップニー 防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75℃まで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
28	アイ・ソネックス株式会社	ナーセントアップニー 本体	×	×	×	洗浄の際は、アルコール清拭。(漬け置き不可)

	企業名	商品名	石鹼や洗剤による丸洗い洗浄	熱水洗浄 80度10分間	0.05%次亜塩素酸 ナトリウム 30分間浸漬	その他 備考欄
29	アイ・ソネックス株式会社	FC-コキュー君 カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
30	アイ・ソネックス株式会社	FC-コキュー君 本体	×	×	×	洗浄の際は、アルコール清拭。(漬け置き不可)
31	アイ・ソネックス株式会社	ゲルファースト 通気カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
32	アイ・ソネックス株式会社	ゲルファースト 防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
33	アイ・ソネックス株式会社	ゲルファースト 本体	×	×	×	洗浄の際は、アルコール清拭。(漬け置き不可)
34	アイ・ソネックス株式会社	エルダークッション カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
35	アイ・ソネックス株式会社	エルダークッション 本体	×	×	×	洗浄の際は、アルコール清拭。(漬け置き不可)
36	アイ・ソネックス株式会社	FC-クローバー 防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
37	アイ・ソネックス株式会社	FC-クローバー 本体	×	×	×	洗浄の際は、アルコール清拭。(漬け置き不可)
38	アイ・ソネックス株式会社	FC-フィット(背) ベース部	○	○	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
39	アイ・ソネックス株式会社	FC-フィット(背) ロングパット 本体	○	○	○	洗浄の際は手洗い。
40	アイ・ソネックス株式会社	FC-フィット(背) ロングパット カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
41	アイ・ソネックス株式会社	FC-フィット(腰) 防水カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、裏返して日陰乾燥。
42	アイ・ソネックス株式会社	FC-フィット(腰) 本体	×	×	×	洗浄の際は、アルコール清拭。(漬け置き不可)
43	アイ・ソネックス株式会社	FC-2/FC-アジャスト兼用 背ソフトクッション	○	×	×	背板を抜いてから洗浄。洗浄、乾燥とも75°Cまで。
44	アイ・ソネックス株式会社	FC-2 脇パット カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
45	アイ・ソネックス株式会社	FC-2 脇パット 本体	○	○	○	洗浄の際は手洗い。
46	アイ・ソネックス株式会社	FC-2 座クッション カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
47	アイ・ソネックス株式会社	FC-2 座クッション 本体	○	○	○	洗浄の際は手洗い。
48	アイ・ソネックス株式会社	FC-2 座クッション用 クッションパット	○	×	×	洗浄の際は手洗い、75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
49	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト 骨盤パット カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
50	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト 骨盤パット 本体	○	×	○	洗浄の際は手洗い、75°Cまで。
51	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト サイドパット カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
52	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト サイドパット 本体	○	×	○	洗浄の際は手洗い、75°Cまで。
53	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト 座クッション カバー	○	×	×	洗浄、乾燥とも75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
54	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト 座クッション 本体	○	×	○	洗浄の際は手洗い、75°Cまで。
55	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト 座クッション用 クッションパット	○	×	×	洗浄の際は手洗い、75°Cまで。脱水後、日陰乾燥。
56	アイ・ソネックス株式会社	FC-アジャスト 座クッション用 大腿パット	○	×	×	洗浄の際は手洗い、75°Cまで。
57	パラマウントベッド株式会社	エバーブラウド 通気タイプ カバー	○	×	×	次亜塩素酸ナトリウム0.02%5分浸漬後に洗濯可能
58	パラマウントベッド株式会社	エバーブラウド 通気タイプ 本体	○	×	×	
59	パラマウントベッド株式会社	ストレッチグライド 通気タイプ カバー	○	×	×	次亜塩素酸ナトリウム0.02%6分浸漬後に洗濯可能
60	パラマウントベッド株式会社	ストレッチグライド 通気タイプ 本体	○	×	×	
61	パラマウントベッド株式会社	アクアフロート 通気タイプ カバー	○	×	×	次亜塩素酸ナトリウム0.02%7分浸漬後に洗濯可能
62	パラマウントベッド株式会社	アクアフロート 通気タイプ 本体	○	×	×	
63	パラマウントベッド株式会社	エバーフィットC3 通気タイプ カバー	○	×	×	次亜塩素酸ナトリウム0.02%8分浸漬後に洗濯可能
64	パラマウントベッド株式会社	エバーフィットC3 通気タイプ 本体	○	×	×	

	企業名	商品名	石鹼や洗剤による丸洗い洗浄	熱水洗浄 80度10分間	0.05%次亜塩素酸 ナトリウム 30分間浸漬	その他 備考欄
65	パラマウントベッド株式会社	エバーフィット 通気タイプ カバー	○	×	×	次亜塩素酸ナトリウム0.02%9分浸漬後に洗濯可能
66	パラマウントベッド株式会社	エバーフィット 通気タイプ 本体	○	×	×	
67	パラマウントベッド株式会社	ストレッチフィット 通気タイプ カバー	○	×	×	次亜塩素酸ナトリウム0.02%10分浸漬後に洗濯可能
68	パラマウントベッド株式会社	ストレッチフィット 通気タイプ 本体	○	×	×	
69	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Lサイズ 通気タイプ	○	○	×	
70	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Mサイズ 通気タイプ	○	○	×	
71	パラマウントベッド株式会社	バナナフィット Sサイズ 通気タイプ	○	○	×	
72	パラマウントベッド株式会社	バナナター Lサイズ 通気タイプ カバー	○	×	×	
73	パラマウントベッド株式会社	バナナター Lサイズ 通気タイプ 本体	○	×	×	
74	パラマウントベッド株式会社	バナナター Mサイズ 通気タイプ カバー	○	×	×	
75	パラマウントベッド株式会社	バナナター Mサイズ 通気タイプ 本体	○	×	×	
76	パラマウントベッド株式会社	バナナター Sサイズ 通気タイプ カバー	○	×	×	
77	パラマウントベッド株式会社	バナナター Sサイズ 通気タイプ 本体	○	×	×	
78	株式会社ウイズ	ナーシングラッグ 二匹物 NR-2P	○	×	×	洗剤は中性洗剤、弱水流での洗浄
79	株式会社ウイズ	ナーシングラッグ ベッドシーツ NR-06	○	×	×	洗剤は中性洗剤、弱水流での洗浄
80	株式会社ウイズ	ナーシングラッグ 車いす用クッション NR-20、NR-21	○	×	×	洗剤は中性洗剤、弱水流での洗浄
81	株式会社ウイズ	ナーシングラッグ 車いす用クッション NR-30	○	×	×	洗剤は中性洗剤、弱水流での洗浄
82	株式会社ウイズ	ナーシングラッグ 車いす用クッション NR-27	○	×	×	洗剤は中性洗剤、弱水流での洗浄
83	株式会社ウイズ	ナーシングラッグ 車いす用背あて NR-04	○	×	×	洗剤は中性洗剤、弱水流での洗浄
84	株式会社加地	エクスジェルアウルREHAシリーズ用標準カバー	○	×	×	30度洗浄、乾燥機不可
85	株式会社モルテン	ピーチ	○	漬け置き○	○	高温時に加重をかけないこと。洗濯温度40℃以下
86	株式会社モルテン	ミント	○	漬け置き○	○	高温時に加重をかけないこと。洗濯温度40℃以下
87	株式会社モルテン	シーボス カバー	○	漬け置き○	○	洗濯温度40℃以下
88	株式会社モルテン	シーボス 本体	×	×	×	
89	株式会社モルテン	シーボスエレフ カバー	○	漬け置き○	○	洗濯温度40℃以下
90	株式会社モルテン	シーボスエレフ 本体	×	×	×	
91	株式会社モルテン	レスポ カバー	○	漬け置き○	○	洗濯温度40℃以下
92	株式会社モルテン	レスポ 本体	×	×	×	
93	株式会社モルテン	パワークッション カバー	○	漬け置き○	○	洗濯温度40℃以下
94	株式会社モルテン	パワークッション 本体	×	×	×	
95	株式会社モルテン	セロリ	○	漬け置き○	○	高温時に加重をかけないこと。洗濯温度40℃以下
96	シーホネン株式会社	ダブルウェーブマットレス 本体	○	○	×	洗浄、乾燥とも105℃以下
97	シーホネン株式会社	ダブルウェーブマットレス カバー	○	×	×	洗浄40℃まで、中性洗剤使用
98	シーホネン株式会社	リバーシブルマットレス 本体	○	○	×	※ハード面:洗浄、乾燥とも100℃以下(ソフト面:洗浄30℃、乾燥80℃以下)
99	シーホネン株式会社	リバーシブルマットレス カバー	○	×	×	洗浄40℃まで、中性洗剤使用

床ずれ防止用具とポジショニング用具の耐薬品性・耐洗浄性等について

表3 各社問合せ窓口一覧

各社とも受付体制を縮小して運営しております。このため、お電話が繋がりにくい状況や、回答に通常よりもお時間いただく場合があることご容赦ください。

会社名	部署	電話番号	メールアドレス	担当者	備考
タカノ株式会社	ヘルスケア部門	0265-72-3157	fukushi@takano-net.co.jp		
アクションジャパン株式会社	営業部	078-5-843-5417	info@actionjapan.co.jp	西村	
株式会社伸和	ウンドケア営業部	052-261-9586	si0068@k-shinwa.jp	佐藤 泰弘	
株式会社ケーブ		046-821-5511(代表)	lovingcare@cape.co.jp		音声ガイダンスより、商品に関するお問い合わせを選択してください。
アイ・ソネックス株式会社	企画開発事業部	086-200-1550	katayama@nasent.net		
パラマウントベッド株式会社	コールセンター		https://www.paramount.co.jp/contact/inquiry		ホームページのお問合せフォームよりご連絡ください。
株式会社ウィズ	東京営業所	03-5821-8572	tokyo@hello-with.com	奥山	
株式会社加地	マーケティング本部	0774-98-2633	k_saruma@exgel.jp	左留間 佳奈子	
株式会社モルテン	品質保証グループ	082-842-9975			
シーホネンス株式会社	営業支援室	0120-20-1001	sales@seahonence.co.jp	宮脇勇二	